

VITUS Core Cooling™

Instruzioni per l'uso



Contenuti

01 Avvertenze	3
02 VITUS Core Cooling™ - Informazioni generali	4
03 Funzioni del dispositivo	6
04 Posizionamento	7
05 L'avviamento	8
06 Interfaccia utente	9
06a Avvio rapido del livello operatore: Programmazione della VITUS Key Card	10
06b Avvio rapido del livello operatore: VITUS Key Card - Reset	12
06c Livello operatore: Impostazioni general	14
06d Livello cliente	18
07 Polsini - sostituzione	21
08 Pulizia e manutenzione	22
09 Risoluzione dei problemi	23
10 Garanzia	23
11 Contatto del servizio tecnico	23

01 Avvertenze



- Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio. (Pericolo dicortocircuiti elettrici).
- Assicurarsi che la presa di corrente collegata all'apparecchio sia correttamente collegata a terra.
- Utilizzare esclusivamente il set di cavi di rete fornito dal produttore.



- **ATTENZIONE: le persone con pacemaker o defibrillatori impiantati non devono utilizzare il sistema VITUS Core Cooling™ a causa dei magneti installati.**



- Non rimuovere la targhetta dall'unità.
- Per la manutenzione o la riparazione dell'apparecchio spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di rete.
- Le riparazioni devono sempre essere effettuate con ricambi originali.
- Un uso improprio comporta l'esclusione della responsabilità: Il produttore si assume la responsabilità per la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del prodotto solo se il prodotto stesso viene installato, utilizzato e mantenuto in conformità alle istruzioni per l'uso.

02 VITUS Core Cooling™ - Informazioni generali

VITUS Core Cooling™ è un metodo per l'applicazione olistica del freddo. Il dispositivo sfrutta le proprietà naturali di scambio di calore di entrambi i palmi delle mani per consentire un raffreddamento olistico del corpo, raffreddandoli in combinazione con una leggera pressione negativa. I palmi delle mani, ricchi di vasi sanguigni, agiscono come efficienti scambiatori di calore che garantiscono una rapida ed efficace dissipazione del calore. Ciò rende VITUS Core Cooling™ un'applicazione estremamente delicata e applicazione del freddo estremamente dolce e delicata.



Aree di applicazione

Per motivi legali, desideriamo sottolineare che VITUS Core Cooling™ non è un metodo di trattamento medico riconosciuto. Tutte le affermazioni sulla modalità di utilizzo si basano sull'esperienza degli utenti. Si precisa espressamente che non viene fatta alcuna promessa di guarigione e non viene garantito o promesso alcun alleviamento della malattia.

Le applicazioni a freddo sono utilizzate nelle seguenti aree:

Sport: prima, dopo o durante le sessioni di allenamento per accelerare la rigenerazione e aumentare le prestazioni

Benessere: per rilassarsi e migliorare il benessere generale

Sollievo dal dolore: a supporto dei dolori articolari (cronici)

CONTROINDICAZIONI:

VITUS Core Cooling™ **NON** deve essere usato in caso

- pacemaker o defibrillatori impiantati
- gravidanzat
- allergia al freddo


La temperatura/la durata

La temperatura minima di VITUS Core Cooling™ è di 4°C. La temperatura e la durata possono essere personalizzate.

Sulla base di studi scientifici, Plabba consiglia di effettuare cinque cicli consecutivi per applicazione a una temperatura 5°C per un periodo di 2 minuti ciascuno con una pausa di un minuto.

Il trattamento deve essere effettuato almeno una volta alla settimana.

03 Funzioni del dispositivo

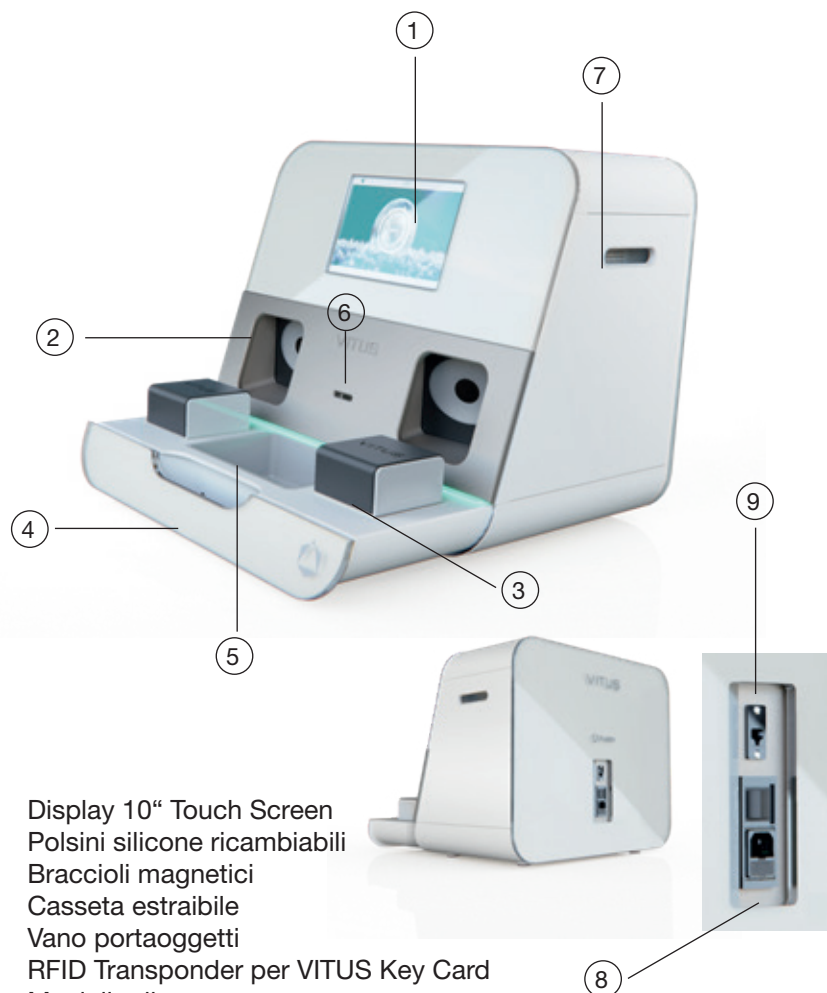

1. Display 10" Touch Screen
2. Polsini silicone ricambiabili
3. Braccioli magnetici
4. Casseta estraibile
5. Vano portaoggetti
6. RFID Transponder per VITUS Key Card
7. Maniglie di trasporto
8. Interruttore accensione/spegnimento, presa VDE
9. Presa LAN per il servizio tecnico

04 Posizionamento



1. A causa del peso del dispositivo, assicurarsi che due persone siano disponibili per persone per montare il dispositivo.
2. Posizionare il dispositivo in modo che tutti gli elementi di comando siano liberamente accessibili. In caso di installazione davanti a una parete: Per facilitare l'accensione e lo spegnimento e la rimozione della spina di rete, assicurarsi che il dispositivo non sia posizionato direttamente contro la parete.
3. Assicurarsi che il dispositivo sia su una superficie piana.
4. Utilizzare esclusivamente il set di cavi fornito dal produttore.

05 Installazione



1. Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato su una superficie piana.
2. Inserire il cavo di alimentazione nell'apposito slot sul retro de dispositivo.
3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro. (Per i requisiti di alimentazione, vedere „Dati tecnici“.)
4. Premere il pulsante di accensione dell'unità.

Disattivazione

1. Premere il pulsante di accensione sull'interfaccia utente.
2. Spegnerne l'apparecchio con l'interruttore sul retro (4).

Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente spento se non viene utilizzato per diverse ore.

06 Interfaccia utente



L'interfaccia utente de VITUS è stato sviluppato e realizzato secondo gli standard più recenti. Quando si accende il dispositivo, l'interfaccia utente si attiva automaticamente e guida l'utente in modo intuitivo attraverso il programma RFID.

L'interfaccia utente de VITUS è composta da due livelli:

1. livello cliente: dopo la programmazione iniziale del RFID del cliente, il cliente viene guidato in modo intuitivo attraverso il programma e l'applicazione.
2. livello operatore: a livello operatore è possibile impostare il numero di cicli, il numero di applicazioni, la durata del ciclo, la temperatura e la durata della pausa. L'operatore può anche visualizzare le informazioni sul dispositivo, come il numero totale di cicli.

06a Livello operatore: Programmazione della VITUS Key Card



1. Toccare il touchscreen.



2. Inserire VITUS Key Card.



3. Selezionare „New User“.



3. Viene visualizzato il pop-up „Password“: Inserire la password dell'operatore. (admin).



4. Appare il pop-up „Insert your name“: Inserire il nome del cliente (Nick-name).



5. Appare una panoramica dei parametri dell'applicazione. Selezionare „Modifica“ per personalizzare.



6. Impostare la durata e il numero del ciclo individuale, la temperatura e le pause. Confermare con „OK“.



7. Inserire il numero totale di applicazioni. Confermare con „OK“: La scheda è caricata.



8. Panoramica delle impostazioni appare: Selezionare „Key Info“.




9. Controllare le impostazioni, rimuovere la scheda e tornare alla schermata iniziale.

Plabba raccomanda che la programmazione iniziale della scheda venga fatta insieme al cliente, per poter rispondere con precisione alle sue esigenze.

06b Livello operatore: VITUS Key Card - Reset



1. Toccare il touchscreen.

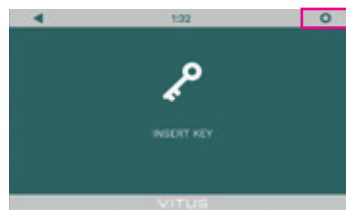

2. Selezionare le impostazioni.



7. Le informazioni della carta vengono cancellate.



8. Confermare con „OK“.



3. Inserire la password dell'operatore. (admin)



4. Appare la panoramica:
Inserire la scheda chiave.



9. Selezionare „New User“.



10. Inserire il nome del nuovo cliente. Scheda chiave/ Applicazioni programma secondo 06a/5.



5. Selezionare „Key Info“.




6. Selezionare „Erase“.

06c Livello operatore: Impostazioni generali



1. Toccare il touchscreen.

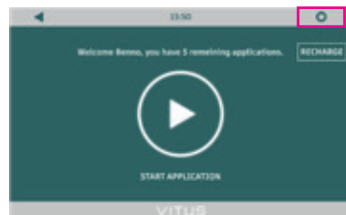

2. Selezionare le impostazioni.



3. Inserire la password dell' operatore. (admin)



4. Viene visualizzato il menu principale.



1. SUMMERY



Mostra una panoramica completa di cicli, tempi di esecuzione e client



2. KEY INFO



Informazioni sullo stato della scheda chiave inserita



3. NEW USER



Riprogrammazione con scheda chiave vuota inserita



4. RECHARGE



Ricarica della chiave elettronica del cliente

06c Livello operatore: Impostazioni generali:



5. SETTINGS



Opzioni di impostazione ora, data, password operatore individuale



6. INFO



Informazioni sul dispositivo:
Numero di serie,
Temperatura di standby
delle camere

SETTINGS: Creare Password operatore personalizzata



1. Selezionare „Settings“.



2. Selezionare „Password“.



3. Inserire la vecchia password (admin) e confermare.



4. Inserire la nuova password e confermare.

SETTINGS: Impostazione della data e dell'ora



1. Selezionare „Date/Time“.



2. Inserire data/ora e confermare.

06d Livello del cliente:




1. Toccare il touchscreen.




2. Inserire la scheda chiave preprogrammata.




7. Pausa: Rimuovere le mani quando viene richiesto.

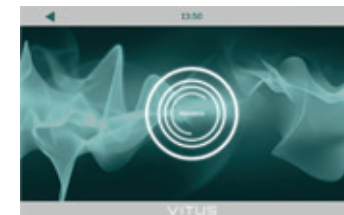


8. Inizia il turno successivo.

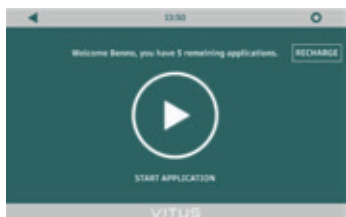


3. Premere il pulsante di avvio.

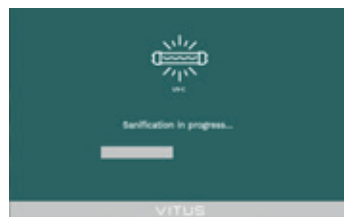

4. Inizia la pulizia della camera.

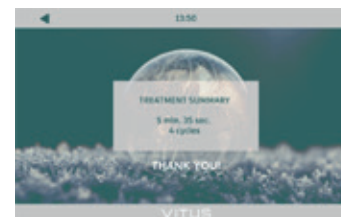

9. L'applicazione termina automaticamente dopo i cicli preimpostati.

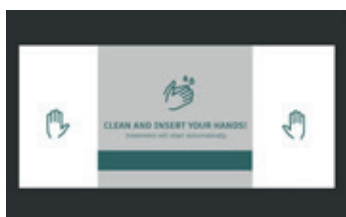

5. Posizionare le mani.



6. Il dispositivo si avvia automaticamente.

Annulamente l'applicazione

L'applicazione può essere annullata in qualsiasi momento premendo due volte la freccia di ritorno.




07 Polsini - sostituzione

Per poter cambiare i polsini il più rapidamente possibile e adattarli così in modo ottimale al cliente, sia la piastra di copertura che i supporti dei polsini sono magnetici.



Assicurarsi che l'apparecchio è spento prima di chiudere di cambiare il bracciale!

07a Polsini - sostituzione

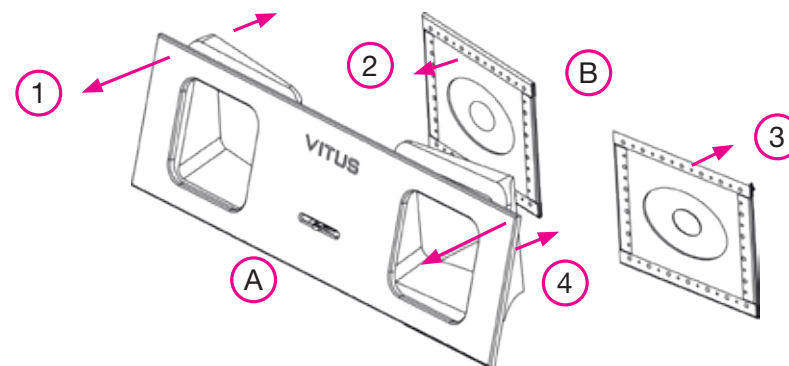

1. Rimuovere la piastra di copertura (A) tirando le due estremità superiori.

2. Rimuovere il supporto del polsini (B).

3. Inserire l'apposito supporto del polsini.

4. Inserire la piastra di copertura.

08 Pulizia e disinfezione

Unità esterna	Pulire l'alloggiamento a intervalli regolari con un panno umido, non bagnato. Quindi asciugare con cura l'alloggiamento.
Display	Dopo ogni utilizzo, pulire il display con un panno disinfettante umido e asciugarlo con un panno in microfibra fine.
Vano portaoggetti	Pulire il scomparto per il deposito dopo ogni utilizzo, almeno 3 volte al giorno, con un panno disinfettante umido.
Pulizia interna	Il sistema di camere viene disinfettato automaticamente (UV). Inoltre, pulire regolarmente la camera con un panno umido, non bagnato. Quindi asciugare con cura la camera.

09 Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non si accende.	Controllare la spina di rete.
L'apparecchio non riconosce la VITUS Key Card.	Assicurarsi che la Key Card sia inserita correttamente.
L'apparecchio si raffredda solo da un lato.	Eseguire un riavvio completo del dispositivo.
La funzione della telecamera è difettosa.	Eseguire un riavvio completo del dispositivo.

10 Garanzia

Dispositivo: 24 Mesi

Braccioli magnetici: 12 Mesi

11 Contatto servizio tecnico

La VITUS può essere sottoposta a manutenzione e assistenza tramite accesso remoto. In caso di domande o problemi tecnici, contattate il vostro rivenditore VITUS.

Dati tecnici

Dimensioni (mm) Cassetto aperto: Cassetto chiuso:	573 x 485 x 600 (L x A x P) 573 x 485 x 375 (L x A x P)
Peso	30 kg
Alimentazione	Tensione di rete 100 - 240 V AC; 50/60 Hz - presa VDE
Consumi	Dispositivo acceso non in fase trattamento: 40 W Dispositivo durante la fase di trattamento 1 kW max
Interfaccia utente	Display con Touch-Screen 10 pollici, TFT
Temperatura minima della superficie a contatto	+ 4° Celsius
Depressione massima nella camera di trattamento	440 cmHg (rientra legge per uso estetico)

Copyright ©, Plabba GmbH

Tutti i diritti sono riservati in tutti i paesi.

Tutti i disegni, le immagini e i testi di questo manuale sono di proprietà del produttore.

È vietata la riproduzione anche parziale di disegni, immagini o testi.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso..