

VITUS Core Cooling™

Instrucciones de uso



Contenido

| | |
|--|----|
| 01 Advertencias | 3 |
| 02 VITUS Core Cooling™ - Generalidades | 4 |
| 03 Funciones del aparato | 6 |
| 04 Posicionamiento | 7 |
| 05 Puesta en servicio | 8 |
| 06 Interfaz de usuario | 9 |
| 06a Inicio rápido nivel operador: Programación de la VITUS Key Card | 10 |
| 06b Inicio rápido nivel operador: VITUS Key Card - Reinicio | 12 |
| 06c Nivel operador: Ajustes generales | 14 |
| 06d Nivel cliente | 18 |
| 07 Manguitos - sustitución | 21 |
| 08 Limpieza y cuidado | 22 |
| 09 Solución de problemas | 23 |
| 10 Garantía | 23 |
| 11 Servicio técnico Contacto | 23 |

01 Advertencias



- No vierta agua ni otros líquidos sobre el aparato. (Peligro de cortocircuitos eléctricos).
- Asegúrese de que el enchufe del aparato esté correctamente conectado a la toma de tierra.
- Utilice únicamente el juego de cables de red suministrado por el fabricante.



- **PRECAUCIÓN: Las personas con un marcapasos o un desfibrilador implantado no deben utilizar VITUS Core Cooling™ debido a los imanes integrados.**



- No retire la placa de características del aparato.
- Para el mantenimiento o la reparación del apague el aparato y desenchufe el desconecte el cable de alimentación.
- Las reparaciones deben realizarse siempre con piezas de repuesto originales.
- El uso inadecuado dará lugar a una exención de responsabilidad: El fabricante sólo se hace responsable de la seguridad, fiabilidad y rendimiento del producto si éste se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

02 VITUS Core Cooling™ - Generalidades

VITUS Core Cooling™ es un método para la aplicación holística del frío. El dispositivo utiliza las propiedades naturales de intercambio de calor de ambas palmas de la mano para permitir un enfriamiento holístico del cuerpo enfriándolas en combinación con una ligera presión negativa. Las palmas, ricas en vasos sanguíneos, actúan como eficientes intercambiadores de calor que garantizan una disipación rápida y eficaz del calor. Esto hace que VITUS Core Cooling™ ofrezca una aplicación de frío muy suave y delicada.



Ámbitos de aplicación

Por razones legales, nos gustaría señalar que VITUS Core Cooling™ no es una terapia médica reconocida. Todas las afirmaciones realizadas sobre el modo de acción se basan en la experiencia de los usuarios. Se señala expresamente que no se hace ninguna promesa de curación y que no se garantiza ni promete el alivio de enfermedades.

Deporte: antes, después o durante las sesiones de entrenamiento para acelerar la regeneración y aumentar el rendimiento

Bienestar: para relajarse y mejorar el bienestar general

Alivio del dolor: para aliviar el dolor articular (crónico) dolor articular

CONTRAINDICACIONES:

VITUS Core Cooling™ NO debe utilizarse durante el

- marcapasos o un desfibrilador implantado
- embarazo
- alergia al frío

Temperatura/duración

La temperatura mínima de VITUS Core Cooling™ es de 4°C. La temperatura y la duración pueden personalizarse. Basándose en estudios científicos, Plabba recomienda cinco ciclos consecutivos por aplicación a una temperatura de 5°C durante un periodo de 2 minutos cada uno con una pausa de un minuto. La aplicación debe realizarse al menos una vez a la semana.

03 Funciones del aparato



1. Pantalla táctil
2. Puños sustituibles de silicona medicos
3. Reposabrazos magnéticos
4. Cassette extraíble
5. Bandeja de almacenamiento
6. Transpondedor RFID para VITUS Key Card
7. Asas de transporte
8. Interruptor de encendido/apagado, conexión eléctrica
9. Servicio de conexión LAN

04 Posicionamiento



1. Debido al peso del aparato, asegúrese de que haya dos personas para instalarlo.
2. Coloque el aparato de forma que se pueda acceder libremente a todos los elementos de mando. Si el aparato está colocado frente a una pared: Asegúrese de que el aparato no esté colocado directamente contra la pared, de modo que pueda encenderse y apagarse fácilmente y que el enchufe de red pueda desenchufarse con facilidad.
3. Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie plana.
4. Utilice únicamente el enchufe suministrado.

05 Puesta en servicio



1. Asegúrese de colocar el aparato sobre una superficie plana.
2. Conecte el cable de alimentación a la toma situada en la parte posterior del aparato.
3. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente. Para conocer los requisitos de alimentación, consulte „Datos técnicos“.
4. Pulse el botón de encendido del aparato.

Apagado

1. Pulse el botón de encendido de la interfaz de usuario.
2. Apaga el aparato con el botón de la parte trasera (4).

Asegúrese de que el aparato esté completamente apagado si no se utiliza durante varias horas.

06 Interfaz de usuario



La interfaz de usuario de VITUS se ha desarrollado conforme a las normas más recientes. Tras la puesta en servicio del dispositivo, la interfaz de usuario se enciende automáticamente y le guía intuitivamente por el programa tras introducir el medio RFID.

La interfaz de usuario de VITUS consta de dos niveles:

1. nivel cliente: tras la correcta programación inicial del medio RFID del cliente, éste es guiado intuitivamente por el programa y la aplicación.
2. nivel operador: en el nivel operador, se puede configurar el número de ciclos, el número de aplicaciones, la duración de los ciclos, la temperatura y la duración de las pausas, temperatura y la duración de las pausas. Además operador también tiene la opción de introducir información del aparato como el número total de ciclos.

06a Inicio rápido nivel operador: Programación de la tarjeta VITUS



1. Toque la pantalla táctil.



2. Tarjeta VITUS vacía inserte.



3. Pulse „New User“.




3. Aparece la pop-up „Password“: Introduzca la contraseña del operador (admin).



4. Aparece Pop-up „Insert your name“; introduzca el nombre del cliente (apodo).



5. Aparece el resumen de los parámetros. Pulse „MODIFY“ para personalizar.

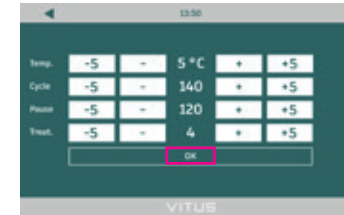

6. Ajuste la duración y el número de ciclos individuales, la temperatura y las pausas. Confirme con „OK“.



7. Introduzca el número total de solicitudes. Confirme con „OK“: La tarjeta está cargada.



8. Aparece la vista general de ajustes: Seleccione „Key info“.




9. Compruebe la configuración, retire la tarjeta y vuelva a la pantalla de inicio con la tecla de retorno.

Plabba recomienda realizar siempre la programación inicial de la tarjeta-llave personalizada junto con el cliente para poder responder con precisión a sus necesidades.

06b Inicio rápido nivel operador: VITUS Key Card - Reinicio



1. Toque la pantalla táctil.

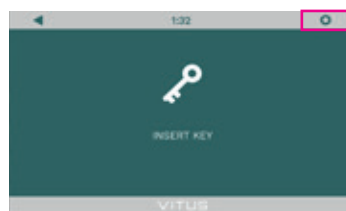

2. Seleccione ajustes.



7. Se elimina la información de la tarjeta.



8. Confirme con „OK“.



3. Introduzca la contraseña (admin).



4. Aparece la vista general: Insertar tarjeta.



9. Seleccione „New User“.



10. Introduzca el nuevo nombre del cliente. Programe la tarjeta según 06a/5.



5. Seleccione „Key Info“.



6. Seleccione „Erase“.

06c Nivel de operador: Ajustes generales



1. Toque la pantalla táctil.



2. Seleccione ajustes.



3. Introduzca la contraseña (admin).



4. Aparece la vista general:



1. SUMMERY



Muestra una visión completa de ciclos, tiempo de ejecución y clientes



2. KEY INFO



Información de estado de tarjeta introducida



3. NEW USER



Reprogramación con tarjeta vacía



4. RECHARGE



Recarga de la tarjeta de cliente existente

06c Nivel de operador: Ajustes generales



5. SETTINGS



Opciones de configuración de la hora, fecha, contraseña de operador



6. INFO



Información del dispositivo: Número de serie, temperatura de espera de las cámaras

SETTINGS: Crear contraseña de operador personalizada



1. Selecciona „Settings“.



2. Selecciona „Password“.



3. Introduzca la antigua contraseña (admin) y confirme.



4. Introduzca y confirme la nueva contraseña.

SETTINGS: Fijar fecha y hora



1. Seleccione „Date/Time“.



2. Introduzca la fecha/hora y confirme.

06d Nivel del cliente:



1. Toque la pantalla táctil.




2. Inserte la tarjeta preprogramada.



7. Pausa: Retire las manos y vuelva a colocarlas cuando se le indique.



8. Comienza la siguiente ronda.

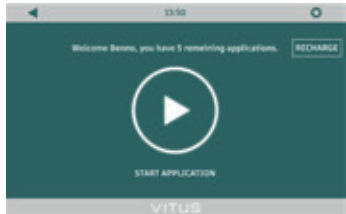


3. Pulse el botón de inicio.



4. Comienza la limpieza UV de la cámara.



9. La aplicación finaliza automáticamente tras los ciclos preestablecidos.

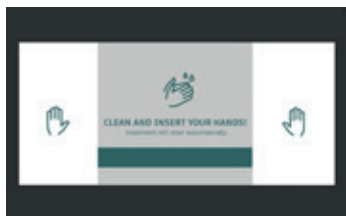

5. Coloque las manos.



6. El aparato se pone en marcha automáticamente.

Cancelar la aplicación

La aplicación puede cancelarse en cualquier momento pulsando la tecla flecha de retorno dos veces.




07 Puños - cambio

Tanto la placa de cubierta como los soportes de los manguitos se fijan magnéticamente para que los manguitos puedan cambiarse lo más rápidamente posible y adaptarse así de forma óptima al cliente.



Asegúrese de que el aparato esté cerrado y desconectado antes de cambiar el manguito!

07a Puños - cambio

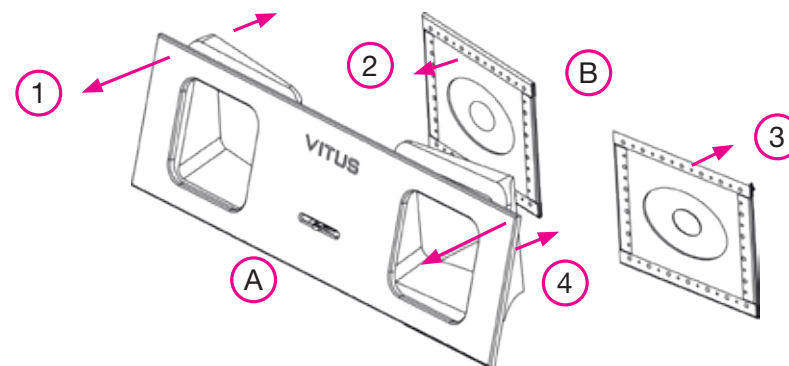

1. Retire la placa de cubierta (A) tirando de los dos extremos superiores.

2. Retire el soporte del manguito (B).

3. Inserte el soporte del manguito correspondiente.

4. Inserte la placa de cubierta.

08 Limpieza y desinfección

| | |
|-------------------|---|
| Carcasa | Limpie la carcasa a intervalos regulares con un paño húmedo, no mojado. A continuación, seque la carcasa con cuidado. |
| Display | Limpie la pantalla después de cada uso con un paño húmedo desinfectante y séquela con un paño fino de microfibra. |
| Bandeja | Limpie la bandeja después de cada uso, al menos 3 veces al día con una toallita húmeda desinfectante. |
| Limpieza interior | El sistema de cámaras se desinfecta automáticamente (UV). Además, limpie la cámara regularmente con un paño húmedo, no mojado. A continuación, seque la cámara con cuidado. |

09 Solución de problemas

| | |
|---|--|
| El aparato no se enciende. | Compruebe el enchufe de red. |
| El aparato no reconoce la VITUS Key Card. | Asegúrese de que la Key Card está insertado correctamente. |
| El aparato solo se enfría por un lado. | Realice un reinicio completo del dispositivo. |
| La función de cámara está averiada. | Realice un reinicio completo del dispositivo. |

10 Garantía

Dispositivo: 24 meses
Reposabrazos: 12 meses

11 Contacto Servicio Técnico

VITUS se puede mantener y reparar mediante acceso remoto. Si tiene preguntas o problemas técnicos, póngase en contacto con su distribuidor VITUS.

Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Dimensiones del aparato (mm) abierto: cerrado: | 573 x 485 x 600 (al x an x pr) 573 x 485 x 375 (al x an x pr) |
| Peso: | 30 kg |
| Alimentación: | Tensión de red 100 - 240 V CA; 50/60 Hz - Toma VDE |
| Consumo de energía: | Dispositivo en espera: 40 W Dispositivo en uso 1 kW máx. |
| Interfaz de usuario intuitiva: | Pantalla táctil de 10", TFT |
| Temperatura mínima de la superficie de contacto: | + 4° Celsius |
| Presión negativa máxima en la cámara: | 40cmHg |

Copyright ©, Plabba GmbH

Todos los derechos reservados en todos los países.

Todos los dibujos, imágenes y textos de este manual son propiedad del fabricante.

Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, de los dibujos, imágenes o textos.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.